

## Инструкция по использованию препарата Тирзетта® в виде преднаполненного одноразового однодозового шприца с автоинжектором



### **1. Подготовка к применению**

Автоинжектор не встряхивайте. Непосредственно перед инъекцией одной рукой с небольшим усилием снимите колпачок с автоинжектора (Рисунок 1). Не прокручивайте колпачок!

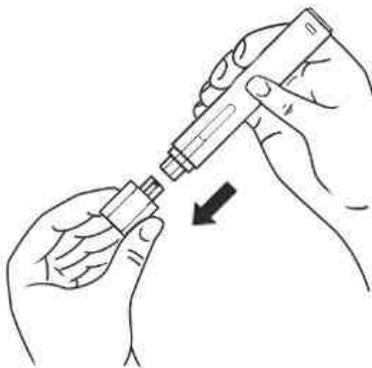


Рисунок 1

### **2. Выполнение инъекции**

Одной рукой возьмите складку кожи, обработанную спиртовой салфеткой, и удерживайте в течение всей процедуры инъекции (Рисунок 2).



Рисунок 2

В другую руку возьмите автоинжектор, удерживая его за корпус. Плотно прижмите автоинжектор к коже под углом 90 градусов и удерживайте его плотно прижатым в течение всей процедуры инъекции (Рисунок 3).

Надавливание автоинжектором на поверхность кожной складки приведет к введению препарата. Следите за введением препарата по движению поршня в зоне контроля.

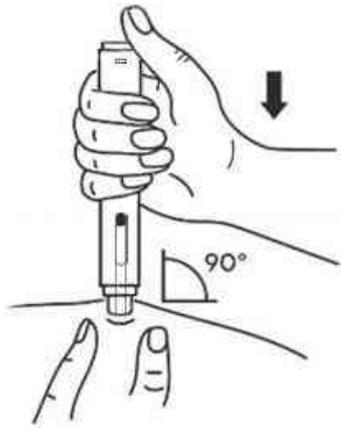


Рисунок 3

Когда вся доза препарата введена, поршень будет полностью опущен и будет сопровождаться соответствующим звуком (Рисунок 4).

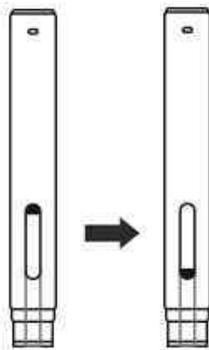


Рисунок 4

После окончания инъекции извлеките автоинжектор, игла автоматически закроется защитным цилиндром (Рисунок 5).

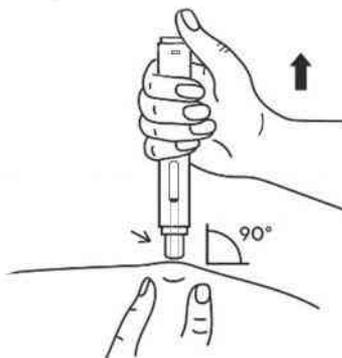


Рисунок 5

### **3. Утилизация**

Наденьте защитный колпачок и утилизируйте инжектор. Повторное использование инжектора невозможно, он будет заблокирован.